

Bima sitt- & coxitdyna rekond

Bima sitt- & coxitdyna rekond är anpassad för offentliga lokaler, väntrum, mottagningar där upprepad spritdesinfektion krävs. Tillverkas i olika höjder och är avsedda för att lättare kunna resa sig efter sittande.

Coxit, är en sittdyna med mjukare del i dynbasen som positionerar ena eller båda låren lutande framåt.

Används efter en höftledsoperation, för att öppna upp höftledsvinkeln.

Det är mycket viktigt att det mjuka urtaget placeras med mjuka delen framåt.

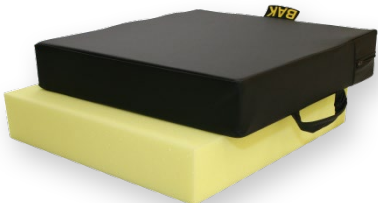
Dynan är försedd med bärhandtag.

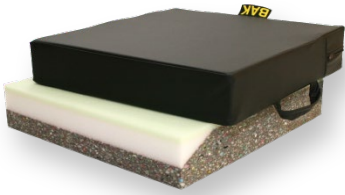
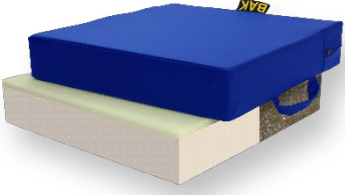
Dynan rengörs med desinfektionsmedel t.ex. DAX Ytdesinfektion plus, DAX Desisoft, Virkon eller liknade. Överdraget har den släta polyuretansidan som ytskikt.

Dynornas stomme tillverkas i två olika utföranden.

1. Lätt modell är något mjukare och passar de flesta brukare.
2. Standard modell är fastare, stadigare och försedd med ett komforthöjande sittskikt.

Artikelnummer, mått och brukarvikt

Förhöjningsdyna lätt hel rekond	Bredd x djup	Art.nr 40x40cm	Art.nr 45x45cm	Art.nr 50x50cm	
	Höjd (cm)				
	5	B130-R			
	7,5	B131-R	B13145-R	B13150-R	
	10	B132-R	B13245-R	B13250-R	
	12,5	B133-R			
	15	B134-R			
	Max brukarvikt		125kg	140kg	150kg
	Coxitdyna lätt 1/2 urtag rekond	Bredd x djup	Art.nr 40x40cm	Art.nr 45x45cm	Art.nr 50x50cm
Höjd (cm)					
5		B1352-R			
7,5		B1362-R	B136245-R	B136250-R	
10		B1372-R	B137245-R	B137250-R	
12,5		B1382-R			
15		B1392-R			
Max brukarvikt		125kg	140kg	150kg	

Förhöjningsdyna standard hel rekond	Bredd x djup	Art.nr 40x40cm	Art.nr 45x45cm	Art.nr 50x50cm
	Höjd (cm)			
	5	B100-R		
	7,5	B103-R	B10345-R	B10350-R
	10	B106-R	B10645-R	B10650-R
	12,5	B109-R		
	15	B112-R		
	Max brukarvikt	150kg	170kg	180kg
Coxitdyna standard ½ urtag rekond	Bredd x djup	Art.nr 40x40cm	Art.nr 45x45cm	Art.nr 50x50cm
	Höjd (cm)			
	5	B1152-R		
	7,5	B1182-R	B118245-R	B118250-R
	10	B1212-R	B121245-R	B121250-R
	12,5	B1242-R		
	15	B1272-R		
	Max brukarvikt	150kg	170kg	180kg

Rekonditionering:

Dynan rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion t.ex. DAX Ytdesinfektion plus, DAX Desisoft, Virkon eller liknade. Dynbasen kan ångtvättas.

Överdraget kan även tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling.

Fakta

Klassificering: Förhöjande dynor

ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Färgkod: Hel dyna – Svart

½ urtag – Blå

Material i dynbas:

Lätt: Högelastisk polyeter 55kg/m³, polyeter 35kg/m³

Standard: Regenererad polyeter 100kg/m³, polyeter 35kg/m³, polyeter 50kg/m³

Material i överdrag: Polyuretan, polyester

BIMA PLASTTEKNIK AB
Dynor för rehabiliteringsvård



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB
Trålvägen 5

432 74 TRÄSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950

info@bimaplastteknik.se

www.bimaplastteknik.se