

Bima svank-kudde

Med hjälp av resårbandet sätts svank-kudden fast på köksstol eller rullstol.

Kan även användas i bil.

Justera svank-kudden i höjdljed så att den ger stöd åt svanken.

Efter tvätt är det viktigt att montera överdraget rätt. Notera märkningen.

Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på dynbasen.

Art.nr, storlek och ISO-kod

Modell	Art.nr	Mått (cm)
Medium	B650	35x17x4
Medium	B65040	40x17x4
Mjuk	B651	35x17x4

ISO-kod: 180945.

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Rengöring och skötsel

Överdraget tvättas i 60 grader med avigsidan utåt och igendraget blytlås, centrifugeras och lufttorkas.

Dynbas med överdrag tvättas i 40 grader och torkas i torkskåp.

Om hela svank-kudden tvättas måste dynbasen vara helt torr innan användning.

Målgrupp

Ett litet enkelt svanstöd/ svank-kudde som finns i två olika hårdheter, mjuk och medium.

Kvalitet, miljö och brandsäkerhet

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Kudden uppfyller ISO7176-16 enligt brandtest utförd av Swerea IVF i Mölndal.

Tillverkning sker i Sverige av BIMA Plastteknik AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.

BIMA Plastteknik AB är kvalitetscertifierad ISO9001 samt miljöcertifierad ISO14001.

Företaget är anslutet till REPA-registret.

Efter förbrukning lämnas svank-kudden till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning.

CE-märkt enligt Läkemiddelsverkets gällande föreskrifter (LVFS) Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.