


# Kildyna för bil

Kildyna som används för att positionera bäckenet framåt. Dynan används i bilsäte. Kildynan har en svagt kupad botten för att kompensera skålningen i sätet. Bakkanten har vinklade hörn för att passa mot ryggen i de flesta bilsäten.



Sittytan är monterad med motsatt luggriktning. Det förhindrar brukaren att glida framåt och samtidigt underlättar det sidoförflyttningar och förflyttning bakåt.

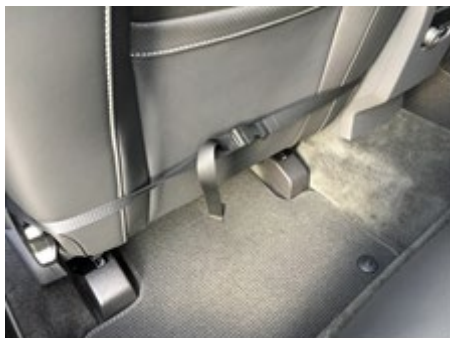

På dynans bakkant finns en rem med snäplås för att spärra fast dynan i bilsätet för att undvika "underglidning" vid kollision. Dynan är även försedd med antiglid material på undersidan.

Art.nr	Mått	Brukarvikt (max)
B350	40x43x6/2cm	135 kg

## Fakta

Klassificering: Dynor för positionering  
ISO-kod 181006

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

Vikt: 1,0 kg

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745

Material i dyna: Regenererad skumplast 100kg/m<sup>3</sup>, högelastisk polyeter 80kg/m<sup>3</sup>.

Material överdrag: Trevira CS laminerad plysch, antiglidtextil, PP-rem, fixlock spanne.

## Rekonditionering

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering/ torktumling

**BIMA PLASTTEKNIK AB**  
*Dynor för rehabiliteringsvård*



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB  
Trålvägen 5

432 74 TRÅSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950

[info@bimaplastteknik.se](mailto:info@bimaplastteknik.se)

[www.bimaplastteknik.se](http://www.bimaplastteknik.se)