



Dynor som avlastar svanskotan



Målgrupp, kombinationer och prestanda

Dynan finns i olika höjder och är avsedda för att lättare kunna resa sig efter sittande samtidigt som de avlastar svanskotan.

Kildyna används för att få ett något framåttippat bäcken vilket medför en ergonomisk riktig sittställning.

Dynan är försedd med ett handtag för att kunna bära med sig. Köksform används på köksstol och är försedd med knytband.



Sittdynan är en medicinteknisk produkt. CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.
Eudamed-registreringsnummer / SRN: SE-MF-000001678.

ISO-kod: 181006

UDI-DI: Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel. Dynan uppfyller brandnorm ISO 7176-16.

Utvecklad och tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimaplastteknik.se.



Hantering



Kontrollera att förpackningen är hel och fri från skador.

Avlägsna plastpåsen och notera den vita etiketten på dynans undersida.

Denna sida ska vara ner.

Den svarta etiketten med gul text (BAK) visar vad som är bak på dynan



Flytta inte dynan med hjälp av dess handtag när brukaren sitter på den. Kläm eller vik inte dynan.



Rengöring och skötsel

Dynan kräver ingen inställning eller service. Rengöring för en god hygien är det enda som behövs.

Dynbasen rengörs genom försiktig avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning.

Den kan också rengöras med ånga. Dynbasen torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp).

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling

alternativt dropptorkas i torkskåp. Var noga med att överdraget monteras enligt märkningarna.

Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på dynbasen.

Dynan förvaras i torrt, gärna i rums tempererat utrymme.



Kvalitetssäkring

För att säkerställa att dynan fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (5år).

Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel. Överdraget ska vara intakt. Kontrollera

dynbasens yta som ska vara utan sprickor, skador och sättningar. Gropar/sättningar under sittbenen

tyder på att dynan är förbrukad och ska bytas ut.



Extra överdrag och tillbehör

För att beställa extra överdrag ange Ö+ artikelnummer, t.ex. ÖB3098.

Som tillbehör finns en universell skyddshätta som med fördel används vid inkontinens.



Källsortering

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.



Försiktighetsåtgärder

1. Dynan är avsedd till att användas på stolar, bänkar, fåtöljer och andra sittmöbler.
2. Dynans storlek ska passa underlaget. För liten dyna innebär risk för instabilitet och risk för att användaren fastnar mellan dyna och fåtölj.
3. När dynan inte används ska den förvaras i ett torrt utrymme, gärna i rumstemperatur.
4. Undvik att klämma eller böja dynan vid förvaring.
5. Använd inte dynan i bilsäte då risk för underglidning finns vid hastig inbromsning.
6. Dynan uppfyller de brandkrav som ställs men kan skadas av eld, cigaretterglöd eller andra brandkällor.
7. Undvik att utsätta dynan för regn och dagg. Vassa föremål och starka kemikalier kan också skada dynan.
8. Mindre förändringar som att runda av kanter, justera dynan för benlängdsskillnad kan normalt göras utan att det påverkar egenskaperna negativt. Dokumentation ska dock alltid göras.
9. Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till Bima Plastteknik AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär www.lakemedelsverket.se



Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Kildyna			Kildyna för köksstol		
Art,nr	Mått (cm)	Brukarvikt max (kg)	Art,nr	Mått (cm)	Brukarvikt max (kg)
B309	40x40x6/2	100	B310	39x36x6/2	100
B3098	40x40x8/2	100	B3108	39x36x8/2	100
B309-43436	43x43x6/2	125			
B309-43439	43x43x9/2	125			
B309-434313	43x43x13/2	125			
Förhöjningsdyna			Förhöjningsdyna för köksstol		
Art,nr	Mått (cm)	Brukarvikt max (kg)	Art,nr	Mått (cm)	Brukarvikt max (kg)
B150	40x40x7,5	100	B250	Köks 39x36x7,5	100
B151	40x40x10	100	B251	Köks 39x36x10	100