



Bima golvsits



Målgrupp, kombinationer och prestanda



Bima golvsits används av personer som behöver mer stöd i sittandet än vad en standardstol kan ge. Används för att ge större möjlighet till aktivitet. Golvsitsen möjliggör en bra sittställning samt underlättar att delta i de dagliga aktiviteterna ex. kunna sitta avslappnat och se på TV/ spela data-spel utan att vara fastspänd.

Vid vila underlättar golvsitsen andningen och ger lindring till besvär som astmatiska symtom, allergier och natthosta.

Fem standardstorlekar finns att beställa.

Det går även att kombinera sitsen med positioneringskuddar av olika slag.



Tillbehör

Det finns kilar med kardborrefastsättning för att positionera golvsitsen i olika lutningar, höjd 10, 15, 20 och 25cm.

För att underlätta förflyttning av golvsitsen när den används finns en vagn att beställa som tillbehör.



Golvsitsen är en medicinteknisk produkt.
CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Kategori: 18 09 21

Golvsitsen är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Utvecklad och tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340 - 419 50 eller via e-post: info@bimasweden.se



Hantering

Avlägsna skyddsemballaget.

Placera golvsitsen på ett plant underlag.

Golvsitsen har en antiglidyta på undersidan. Flytta inte sitsen när den används.



Rengöring och skötsel

Golvsitsen kräver ingen inställning eller service. Rengöring för en god hygien är det enda som behövs. Stommen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning. Den kan också rengöras med ånga. Stommen torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp).

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling alternativt dropptorkas i torkskåp. Var noga med att överdraget monteras enligt märkningarna. Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på stommen.

Golvsitsen förvaras i torrt, gärna i rums tempererat utrymme. Kläm inte sitsen.



Kvalitetssäkring

Säkerställ att produkten fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (5år).

1. Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel.
2. Golvsitsen anses som förbrukad och ska bytas ut om den är har skador som påverkar funktionen.



Källsortering

Stomme och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.



Försiktighetsåtgärder/ risker

Används och förvaras inomhus. Kan användas utomhus vid torrt väder.

Golvsitsen kan skadas av eld, cigaretterglöd eller andra brandkällor.

Utsätt inte golvsitsen för regn och dagg. Vassa föremål och starka kemikalier kan också skada produkten.

Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas.

Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till

Bima Plastteknik AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett

MIR – formulär www.lakemedelsverket.se



Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Art.nr	Storlek	Brukarvikt (kg)	Yttermått (cm)	Sittbredd (cm)	Axelbredd (cm)	Underben (cm)	Lårben (cm)	Rygg+huvud (cm)
910-439540	Golvsits 25	Max 30kg	43x95x40	25	25	25	15	40
910-5010545	Golvsits 30	Max 40kg	50x105x45	30	30	30	20	50
910-5511550	Golvsits 35	Max 50kg	55x115x50	35	35	35	25	60
910-6012555	Golvsits 40	Max 60kg	60x125x55	40	40	40	30	70
910-6513560	Golvsits 45	Max 75kg	65x135x60	45	45	45	35	80