



Inkontinenshätta frotté



Målgrupp, kombinationer och prestanda

Komfortabelt och skyddande hätta som används vid inkontinens.

Inkontinenshättan skyddar dynbasen och förhindrar att urindoft "sätter sig" i dynan.

Hättan har en yta som absorberar vätska och en vätsketät undersida (PU) för att skydda mot inkontinens. Hättans sittyta har motsatt luggriktning, vilket motverkar glidning framåt och underlättar förflyttning bakåt. Den täta undersidan har hög friktion mot underlaget och motverkar skjuvning.

Inkontinenshättan är avsedd för användning på marknaden vanligen förekommande sittdynor med plan- och kupad botten.



Inkontinenshättan är en medicinteknisk produkt.
CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Kategori: (12 25 06 – 03)


Produkten är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Utvecklad och tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340 - 419 50 eller via e-post: info@bimasweden.se



Hantering

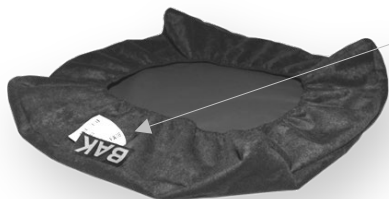

Kontrollera att förpackningen är hel och fri från skador.

Avlägsna plastpåsen och notera den svarta etiketten med gul text "BAK" visar vad som är bak på hättan.



Rengöring och skötsel

Produkten är utformad som en hätta med resår, vilket förenklar vid tvätt.

Inkontinenshättan tvättas i maskin 60°C, centrifugeras och lufttorkas alternativt droptorkas i torkskåp.

Mycket slitstark och tåligt, klarar även att rengöras med alkoholbaserade desinfektionsmedel.

Förvaras i torrt, gärna i rums tempererat utrymme.



Kvalitetssäkring

För att säkerställa att inkontinenshättan fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (2år). Kontrollera att den är fri från skador och att hättan är stretchig och följsam.

Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel.

Minskad spänst i resårband, minskad stretchighet och sprickor i den skyddande polyuretanytan tyder på att hättan är förbrukad och ska bytas ut.



Källsortering

Inkontinenshättan sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.



Försiktighetsåtgärder

1. Produkten är avsedd för användning på marknaden vanligen förekommande sittdynor för att skydda dynan/ dynbas mot inkontinens.
2. Inkontinenshättans storlek ska passa sittdynan.
3. När dynan inte används ska den förvaras i ett torrt utrymme, gärna i rumstemperatur.
4. Produkten uppfyller de brandkrav som ställs men kan skadas av eld, cigarettaglöd eller andra brandkällor.
5. Vassa föremål och starka kemikalier kan skada produkten.
6. Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till Bima Plastteknik AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär www.lakemedelsverket.se

Artikelnummer och mått

Universella mått								
(cm)	Sitsdjup							
Bredd	35	38	40	43	45	47	50	55
35	02-3535	02-3538	02-3540	02-3543				
37,5	02-3735	02-3738	02-3740	02-3743	02-3745	02-3747	02-3750	
40	02-4035	02-4038	02-4040	02-4043	02-4045	02-4047	02-4050	
42,5		02-4238	02-4240	02-4243	02-4245	02-4247	02-4250	
45		02-4538	02-4540	02-4543	02-4545	02-4547	02-4550	
47,5		02-4738	02-4740	02-4743	02-4745	02-4747	02-4750	
50		02-5038	02-5040	02-5043	02-5045	02-5047	02-5050	
52,5			02-5240	02-5243	02-5345	02-5247	02-5250	
55			02-5540	02-5543	02-5545	02-5547	02-5550	02-5555
57,5			02-5740	02-5743	02-5745	02-5747	02-5750	02-5755
60					02-6045	02-6047	02-6050	02-6055

HD-/ REA-/ Invacare-stol		Bima duo	
Art.nr	Art.nr	Art.nr	Mått (cm)
B026	HD Sits barn 38	INKO14-serie	25x20 – 60x55
B028	HD Sits smal 38		
B027	HD Sits normal 45	Bima duo lateral	
B029	HD Rygg barn 35	Art.nr	Mått (cm)
B031	HD Rygg smal 35	INKO15-serie	25x20 – 60x55
B030	HD Rygg normal 42		
B054	REA Komfort 39	Bima komfort soft	
B052	REA Komfort 44	Art.nr	Mått (cm)
B053	REA Komfort 49	INKO20-serie	39x50 – 53x52
B080	Invacare flosshape small 40		
B081	Invacare flosshape medium 43	Bima komfort	
B082	Invacare flosshape large 48	Art.nr	Mått (cm)
		INKO22-serie	39x50 – 53x52
Bima rullstolsdyna plan/kupad			
Art.nr	Mått (cm)	Bima combi	
INKO05-serie	20x22 – 60x55	Art.nr	Mått (cm)
		INKO24-serie	25x20 – 60x55