




Bima mini-, lill- och storgung




Målgrupp, kombinationer och prestanda

Gungan används både för träning av balans och träning av styrka.

1. Med små rörelser gungar man fram och tillbaka.
2. Man kan också sitta och gunga sidledes för att öva upp balans och styrka.

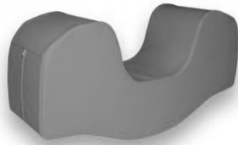

Minigung

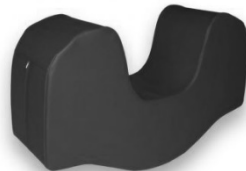

Lillgung



Storgung



Produkten är en medicinteknisk produkt. CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Eudamed-registreringsnummer / SRN: SE-MF-000001678.

ISO-kod: 044815 Arm-, bål- och benträningsredskap.

Produkten är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.

Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB.

Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på telefon: +46 340 419 50 eller via e-post: info@bimasweden.se.



Hantering

Kontrollera att förpackningen är hel och fri från skador. Avlägsna plastpåsen.

Det finns tre storlekar. Kontrollera så det är rätt variant och att gungan passar användaren.



Rengöring och skötsel

Psoaskudden rengörs med ytdesinfektion och därefter eftertorkas den med vatten och tvållösning. Alternativt rengörs den enbart med vatten och tvållösning. Eftertorkas med torkduk.

Psoaskudden förvaras i torrt, gärna i rumstempererat utrymme.



Kvalitetssäkring

För att säkerställa att gungan möter de funktionella och hygieniska kraven under sin avsedda livslängd (10år). Kontrollera att den är fri från skador och uttorkningsprickor.

Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel.

Gropar, sättningar och sprickor i produkten tyder på att produkten är förbrukad och ska bytas ut.



Källsortering

Gungan sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.



Försiktighetsåtgärder

1. När gungan inte används ska den förvaras i ett torrt utrymme, gärna i rumstemperatur.
2. Undvik att klämma eller utsätta gungan för belastning vid förvaring.
3. Produkten uppfyller de brandkrav som ställs men kan skadas av eld, cigaretterglöd eller andra brandkällor.
4. Undvik att utsätta produkten för regn/ dagg. Vassa föremål och starka kemikalier kan också skada produkten.
5. Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till Bima Plastteknik AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär www.lakemedelsverket.se



Artikelnummer och mått

Benämning	Art.nr	Längd (cm)	Bredd (cm)	Höjd (cm)	Sitthöjd (cm)
Minigung	900302	71	24	40	20
Lilligung	900303	82	25	50	25
Storgung	900304	92	28	60	30