



## Bima kildyna och kildyna radner



### Målgrupp, kombinationer och prestanda

Används för att positionera bäckenet bakåt eller framåt.

Kan även användas efter en höftledsoperation, för att öppna höftledsvinkeln.

**Viktigt!** Den höga sidan ska vara bakåt. Dynan positionerar då båda låren framåt.

Kildynan är försedd med ett handtag för att kunna bära med sig. Kildyna med köksform och Radner har inte bärhandtag. Köksform används på köksstol och är försedd med knytband. Radner är avsedd för arbets-/ kontorsstol för ökad rörlighet med benen.



Sittdynan är en medicinteknisk produkt. CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.  
Eudamed-registreringsnummer / SRN: SE-MF-000001678.

ISO-kod: 12 25 06

Dynans vikt: Kildyna 40x40x8/2cm - 0,8kg

Kildyna köksform 39x36x7/2cm - 0,65kg

Kildyna Radner 42x33x7/2cm - 0,65kg

UDI: Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.


Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Utvecklad och tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: [info@bimasweden.se](mailto:info@bimasweden.se)



### Hantering

Kontrollera att förpackningen är hel och fri från skador.

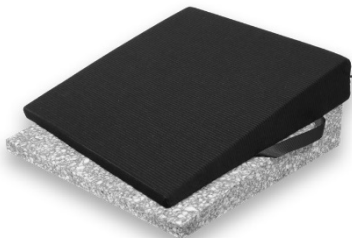

Avlägsna plastpåsen och notera den vita etiketten på dynans undersida. Denna sida ska vara ner. Kilen kan vändas med den högre eller den lägre sidan framåt. Efter en höftledsoperation är det **viktigt** att den höga sidan är bakåt.



Flytta inte dynan med hjälp av dess handtag när brukaren sitter på den



### Rengöring och skötsel

Dynan kräver ingen inställning eller service. Rengöring för en god hygien är det enda som behövs.

Dynbasen rengörs genom försiktig avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvällösning.

Den kan också rengöras med ånga. Dynbasen torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp).

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling

alternativt dropptorkas i torkskåp. Var noga med att överdraget monteras enligt märkningarna.

Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på dynbasen.

Dynan förvaras i torrt, gärna i rums tempererat utrymme. Kläm eller vik inte dynan.



### Kvalitetssäkring

För att säkerställa att dynan fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (5år).

Kontrollera dynbasens yta som ska vara utan sprickor och sättningar. Överdraget ska vara intakt.

Gropar/ sättningar under sittbenen tyder på att dynan är förbrukad och ska bytas ut. Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel.



### Extra överdrag

För att beställa extra överdrag ange Ö+ artikelnummer, t.ex. ÖB304.



## Källsortering

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.



## Försiktighetsåtgärder

1. Dynan är avsedd till att användas på stolar, bänkar, fåtöljer och andra sittmöbler.
2. Dynans storlek ska passa underlaget. För liten dyna innebär risk för instabilitet och risk för att användaren fastnar mellan dyna och fåtölj.
3. När dynan inte används ska den förvaras i ett torrt utrymme, gärna i rumstemperatur.
4. Undvik att klämma eller böja dynan vid förvaring.
5. Använd inte dynan i bilsäte då risk för underglidning finns vid hastig inbromsning.
6. Dynan uppfyller de brandkrav som ställs men kan skadas av eld, cigaretterglöd eller andra brandkällor.
7. Undvik att utsätta dynan för regn och dagg. Vassa föremål och starka kemikalier kan också skada dynan.
8. Mindre förändringar som att runda av kanter, justera dynan för benlängdsskillnad kan normalt göras utan att det påverkar egenskaperna negativt. Dokumentation ska dock alltid göras.
9. Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till Bima Plastteknik AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär [www.lakemedelsverket.se](http://www.lakemedelsverket.se)



## Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Kildyna			Kildyna för köksstol			Kildyna Radner		
Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)	Art nr	Mått (cm)	Brukarv. max (kg)
B30030	30x30x3/1	90	B308	39x36x5/2	125	B3050	42x33x5/2	125
B30035	35x30x5/1	90	B3087	39x36x7/2	125	B3070	42x33x7/2	125
B300	38x38x6/1	125	B3089	39x36x9/2	125	B3090	42x33x9/2	125
B301	38x38x8/1	125	Kildyna kupad					
B302	38x38x10/1	125	B322	40x43x9/3	125			
B306	40x40x3/1	125						
B303	40x40x6/2	125						
B304	40x40x8/2	125						
B305	40x40x10/2	125						
B7016	40x43x6/2	125						
B7018	40x43x10/2	125						
B7026	45x43x6/2	140						
B7028	45x43x10/2	140						
B30345	45x45x6/2	140						
B30445	45x45x8/2	140						
B30545	45x45x10/2	140						
B30350	50x50x6/2	150						
B30450	50x50x8/2	150						
B30550	50x50x10/2cm	150						