



Bima combi



Målgrupp, kombinationer och prestanda

Komfortabel och tryckfördelande rullstolsdyna som direkt avlastar sittbensknölna och svanskotan. Brukaren är känslig för tryck och/ eller smärta. Brukaren kan i de flesta fall ändra sitt läge/ position i sitt sittande. Brukaren behöver avlastning för att förhindra att trycksår eller att smärta uppstår.

Avsedd för användning i, på marknaden vanligen förekommande rullstolar med plan- och hängmattesits. Kupad bottenform används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Plan bottenform används när rullstolen har en fastare och stadigare sits som inte behöver kompenseras med utjämning. Kan även användas i andra sittmöbler, t.ex. fåtölj och soffa.



Sittdynan är en medicinteknisk produkt.
CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Kategori: 12 25 06 – 03

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K
Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Utvecklad och tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340 - 419 50 eller via e-post: info@bimasweden.se



Hantering



Kontrollera att förpackningen är hel och fri från skador.

- Avlägsna plastpåsen och notera den vita etiketten på dynans undersida. Denna sida ska vara ner och pilen visar vad som är bak.
- Den svarta etiketten med gul text "BAK" visar vad som är bak på dynan. Handtaget ska vara framåt.



Flytta inte dynan med hjälp av dess handtag när brukaren sitter på den.



Rengöring och skötsel

Bima combi kräver ingen inställning eller service. Rengöring för en god hygien är det enda som behövs. Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning. Den kan också rengöras med ånga. Dynbasen torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp).

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling alternativt dropptorkas i torkskåp. Var noga med att överdraget monteras enligt märkningarna. Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på dynbasen.



Dynan förvaras i torrt, gärna i rums tempererat utrymme. Kläm eller vik inte dynan.

Kvalitetssäkring

För att säkerställa att dynan fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (5år). Kontrollera dynbasens yta som ska vara utan sprickor och sättningar. Överdraget ska vara intakt. Gropar/ sättningar under sittbenen tyder på att dynan är förbrukad och ska bytas ut. Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel.



Extra/ alternativa överdrag

För att beställa extra överdrag ange Ö+ artikelnummer till exempel Ö24-4043-K. Och för att beställa en Inkontinenshätta ange INKO+ artikelnummer till exempel INKO24-4043-K. För att beställa Bima combi med ett heltäckande inkontinensöverdrag ange art.nr-2 t.ex. 24-4043-P-2.



Källsortering

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.



Försiktighetsåtgärder

1. Dynan är avsedd till att användas i rullstolar.
2. Dynans storlek ska passa rullstolens sits.
3. När dynan inte används ska den förvaras i ett torrt utrymme, gärna i rumstemperatur.
4. Undvik att klämma eller böja dynan vid förvaring.
5. Använd inte dynan i bilsäte då risk för underglidning finns vid hastig inbromsning.
6. Dynan uppfyller de brandkrav som ställs men kan skadas av eld, cigaretterglöd eller andra brandkällor.
7. Undvik att utsätta dynan för regn och dagg. Vassa föremål och starka kemikalier kan också skada dynan.
8. Mindre förändringar som att runda av kanter, justera dynan för benlängdsskillnad kan normalt göras utan att det påverkar egenskaperna negativt. Dokumentation ska dock alltid göras.
9. Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till Bima Plastteknik AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär www.lakemedelsverket.se



Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Bima combi			24- Storlek för vuxna, C24- Storlek för barn, -K = Kupad botten, -P = Plan botten							Höjd (cm)	Max vikt (kg)
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten									
Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58			
35	24-3535-K	24-3538-K	24-3540-K	24-3543-K					9	125	
37,5	24-3735-K	24-3738-K	24-3740-K	24-3743-K	24-3745-K	24-3747-K	24-3750-K		9	125	
40	24-4035-K	24-4038-K	24-4040-K	24-4043-K	24-4045-K	24-4047-K	24-4050-K		9	125	
42,5		24-4238-K	24-4240-K	24-4243-K	24-4245-K	24-4247-K	24-4250-K		9	135	
45		24-4538-K	24-4540-K	24-4543-K	24-4545-K	24-4547-K	24-4550-K		9	135	
47,5		24-4738-K	24-4740-K	24-4743-K	24-4745-K	24-4747-K	24-4750-K		9	135	
50		24-5038-K	24-5040-K	24-5043-K	24-5045-K	24-5047-K	24-5050-K		9	135	
52,5			24-5240-K	24-5243-K	24-5345-K	24-5247-K	24-5250-K		10	180	
55			24-5540-K	24-5543-K	24-5545-K	24-5547-K	24-5550-K	24-5555-K	10	180	
57,5			24-5740-K	24-5743-K	24-5745-K	24-5747-K	24-5750-K	24-5755-K	10	180	
60					24-6045-K	24-6047-K	24-6050-K	24-6055-K	10	180	
35	24-3535-P	24-3538-P	24-3540-P	24-3543-P					7	125	
37,5	24-3735-P	24-3738-P	24-3740-P	24-3743-P	24-3745-P	24-3747-P	24-3750-P		7	125	
40	24-4035-P	24-4038-P	24-4040-P	24-4043-P	24-4045-P	24-4047-P	24-4050-P		7	125	
42,5		24-4238-P	24-4240-P	24-4243-P	24-4245-P	24-4247-P	24-4250-P		7	135	
45		24-4538-P	24-4540-P	24-4543-P	24-4545-P	24-4547-P	24-4550-P		7	135	
47,5		24-4738-P	24-4740-P	24-4743-P	24-4745-P	24-4747-P	24-4750-P		7	135	
50		24-5038-P	24-5040-P	24-5043-P	24-5045-P	24-5047-P	24-5050-P		7	135	
52,5			24-5240-P	24-5243-P	24-5345-P	24-5247-P	24-5250-P		8	180	
55			24-5540-P	24-5543-P	24-5545-P	24-5547-P	24-5550-P	24-5555-P	8	180	
57,5			24-5740-P	24-5743-P	24-5745-P	24-5747-P	24-5750-P	24-5755-P	8	180	
60					24-6045-P	24-6047-P	24-6050-P	24-6055-P	8	180	
Notering: Sittbredd fr.o.m. 52,5 t.o.m. 60cm är extra förstärkt med polyeten EV50 för att klara hög brukarvikt.											
Bredd	20/23	25/28	27/30	30/33	33/36	35/38	40/43	43/46			
25	C24-2520-K	C24-2525-K	C24-2527-K	C24-2530-K	C24-2533-K				6	40	
27		C24-2725-K	C24-2727-K	C24-2730-K	C24-2733-K	C24-2735-K			6	45	
30		C24-3025-K	C24-3027-K	C24-3030-K	C24-3033-K	C24-3035-K	C24-3040-K		6	50	
33		C24-3325-K	C24-3327-K	C24-3330-K	C24-3333-K	C24-3335-K	C24-3340-K	C24-3343-K	6	55	
35		C24-3525-K	C24-3527-K	C24-3530-K	C24-3533-K	C24-3535-K	C24-3540-K	C24-3543-K	6	60	
25	C24-2520-P	C24-2525-P	C24-2527-P	C24-2530-P	C24-2533-P				5	40	
27		C24-2725-P	C24-2727-P	C24-2730-P	C24-2733-P	C24-2735-P			5	45	
30		C24-3025-P	C24-3027-P	C24-3030-P	C24-3033-P	C24-3035-P	C24-3040-P		5	50	
33		C24-3325-P	C24-3327-P	C24-3330-P	C24-3333-P	C24-3335-P	C24-3340-P	C24-3343-P	5	55	
35		C24-3525-P	C24-3527-P	C24-3530-P	C24-3533-P	C24-3535-P	C24-3540-P	C24-3543-P	5	60	