



Bima cubetech



Målgrupp, kombinationer och prestanda

Tryckavlastande sittdyna som ger utpräglat stöd för låren samt avlastar sittbensknölar och svanskota. För brukare som sitter större delen av dagen, kan inte aktivt ändra läge/position i sittandet och har medelhög risk för trycksår. Brukaren behöver stöd/god positionering för att bibehålla ett funktionellt sittande.

Avsedd för användning i, på marknaden vanligen förekommande rullstolar med plan- och hängmattesits. Kupad bottenform används i rullstolar med hängmattesits för att få en jämn sittyta. Plan bottenform används när rullstolen har en fastare och stadigare sits som inte behöver kompenseras med utjämning.



Sittdynan är en medicinteknisk produkt.
CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Kategori: 04 33 03

Dynan är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.
Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Utvecklad och tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0340-419 50 eller via e-post: info@bimasweden.se



Hantering



Kontrollera att förpackningen är hel och fri från skador.

● Avlägsna plastpåsen och notera den vita etiketten på dynans undersida. Denna sida ska vara ner och pilen visar vad som är bak.

● Den svarta etiketten med gul text "BAK" visar vad som är bak på dynan.

Handtaget ska vara framåt.



Flytta inte dynan med hjälp av dess handtag när brukaren sitter på den.



Rengöring och skötsel

Bima cubetech kräver ingen inställning eller service. Rengöring för en god hygien är det enda som behövs. Dynbasen rengörs genom avtorkning med ydesinfektion alt. med vatten och tvällösning. Den kan också rengöras med ånga. Dynbasen torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp). Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling alternativt dropptorkas i torkskåp. Var noga med att överdraget monteras enligt märkningarna. Se till att "peta ut" alla hörn och att överdraget passar bra på dynbasen. Dynan förvaras i torrt, gärna i rums tempererat utrymme. Kläm eller vik inte dynan.



Kvalitetssäkring

För att säkerställa att dynan fungerar på ett korrekt och säkert sätt under sin avsedda livslängd (5år). Kontrollera dynbasens yta som ska vara utan sprickor och sättningar. Överdraget ska vara intakt. Gropar/sättningar under sittbenen tyder på att dynan är förbrukad och ska bytas ut. Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel.



Extra/ alternativa överdrag

För att beställa extra överdrag ange Ö+ artikelnummer till exempel Ö40-4043-K. Och för att beställa en Inkontinenshätta ange INKO+ artikelnummer till exempel INKO40-4043-K. För att beställa Bima cubetech med ett heltäckande inkontinensöverdrag ange art.nr-4 t.ex. 40-4043-P-4.



Källsortering

Dynbas och överdrag sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.



Försiktighetsåtgärder

1. Dynan är avsedd till att användas i rullstolar.
2. Dynans storlek ska passa rullstolens sits.
3. När dynan inte används ska den förvaras i ett torrt utrymme, gärna i rumstemperatur.
4. Undvik att klämma eller böja dynan vid förvaring.
5. Använd inte dynan i bilsäte då risk för underglidning finns vid hastig inbromsning.
6. Dynan uppfyller de brandkrav som ställs men kan skadas av eld, cigaretterglöd eller andra brandkällor.
7. Undvik att utsätta dynan för regn och dagg. Vassa föremål och starka kemikalier kan också skada dynan.
8. Mindre förändringar som att runda av kanter, justera dynan för benlängdsskillnad kan normalt göras utan att det påverkar egenskaperna negativt. Dokumentation ska dock alltid göras.
9. Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till Bima Plastteknik AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär www.lakemedelsverket.se



Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Bima cubetech		40- Storlek för vuxna, C40- Storlek för barn, -K = Kupad botten, -P = Plan botten							Höjd (cm)	Max vikt (kg)
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sitsdjup till ryggör och Sd ^{tot} = Sitsdjup på mitten								
Bredd	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58		
35	40-3535-K	40-3538-K	40-3540-K	40-3543-K					9,4	125
37,5	40-3735-K	40-3738-K	40-3740-K	40-3743-K	40-3745-K	40-3747-K	40-3750-K		9,4	125
40	40-4035-K	40-4038-K	40-4040-K	40-4043-K	40-4045-K	40-4047-K	40-4050-K	40-4055-K	9,4	125
42,5		40-4238-K	40-4240-K	40-4243-K	40-4245-K	40-4247-K	40-4250-K	40-4255-K	9,4	135
45		40-4538-K	40-4540-K	40-4543-K	40-4545-K	40-4547-K	40-4550-K	40-4555-K	9,4	135
47,5		40-4738-K	40-4740-K	40-4743-K	40-4745-K	40-4747-K	40-4750-K	40-4755-K	9,4	135
50		40-5038-K	40-5040-K	40-5043-K	40-5045-K	40-5047-K	40-5050-K	40-5055-K	9,4	150
52,5			40-5240-K	40-5243-K	40-5345-K	40-5247-K	40-5250-K	40-5255-K	10,4	150
55			40-5540-K	40-5543-K	40-5545-K	40-5547-K	40-5550-K	40-5555-K	10,4	150
57,5			40-5740-K	40-5743-K	40-5745-K	40-5747-K	40-5750-K	40-5755-K	10,4	150
60					40-6045-K	40-6047-K	40-6050-K	40-6055-K	10,4	150
35	40-3535-P	40-3538-P	40-3540-P	40-3543-P					8,5	125
37,5	40-3735-P	40-3738-P	40-3740-P	40-3743-P	40-3745-P	40-3747-P	40-3750-P		8,5	125
40	40-4035-P	40-4038-P	40-4040-P	40-4043-P	40-4045-P	40-4047-P	40-4050-P	40-4055-P	8,5	125
42,5		40-4238-P	40-4240-P	40-4243-P	40-4245-P	40-4247-P	40-4250-P	40-4255-P	8,5	135
45		40-4538-P	40-4540-P	40-4543-P	40-4545-P	40-4547-P	40-4550-P	40-4555-P	8,5	135
47,5		40-4738-P	40-4740-P	40-4743-P	40-4745-P	40-4747-P	40-4750-P	40-4755-P	8,5	135
50		40-5038-P	40-5040-P	40-5043-P	40-5045-P	40-5047-P	40-5050-P	40-5055-P	8,5	150
52,5			40-5240-P	40-5243-P	40-5345-P	40-5247-P	40-5250-P	40-5255-P	9,5	150
55			40-5540-P	40-5543-P	40-5545-P	40-5547-P	40-5550-P	40-5555-P	9,5	150
57,5			40-5740-P	40-5743-P	40-5745-P	40-5747-P	40-5750-P	40-5755-P	9,5	150
60					40-6045-P	40-6047-P	40-6050-P	40-6055-P	9,5	150
Bredd	20/23	25/28	27/30	30/33	33/36	35/38	40/43	43/46		
25	C40-2520-K	C40-2525-K							6,5	40
27		C40-2725-K	C40-2727-K	C40-2730-K					6,5	45
30			C40-3027-K	C40-3030-K	C40-3033-K				6,5	50
33			C40-3327-K	C40-3330-K	C40-3333-K	C40-3335-K	C40-3340-K		6,5	55
35				C40-3530-K	C40-3533-K	C40-3535-K	C40-3540-K		6,5	60
25	C40-2520-P	C40-2525-P							6,5	40
27		C40-2725-P	C40-2727-P	C40-2730-P					6,5	45
30			C40-3027-P	C40-3030-P	C40-3033-P				6,5	50
33			C40-3327-P	C40-3330-P	C40-3333-P	C40-3335-P	C40-3340-P		6,5	55
35				C40-3530-P	C40-3533-P	C40-3535-P	C40-3540-P		6,5	60