

# Bima formsits barn

Stabil, komfortabel och tryckavlastande rullstolsdyna. Avsedd för barn och ungdomar men även för små- lätta vuxna. Dynan ger god tryckavlastning och är anpassad för barn och ungdomar som är beroende av rullstol för sina förflyttningar men kan variera sitt sittande.

Helt oberoende av kroppsform anpassar sig dynan efter användaren och avlastar sittbensknölar och svanskota.

Bima formsits barn är förebyggande mot sår. Den används även när det finns risk för trycksår.



Bilden visar en anpassad formsits barn

- ✓ Komfortabel och formstabil
- ✓ Viskoskum CONFOR® foam i sittgrop
- ✓ Antiglid material
- ✓ Svagt formad med bendelare
- ✓ Högre densitet under låren
- ✓ Rundad bakkant
- ✓ Urtag för ryggrör
- ✓ Kupad eller plan botten
- ✓ Anpassningsmöjligheter

## Konstruktion

Inlägget av viskoelastiskt skum i sittgropen gör att dynan anpassar sig för varje individ och stödet under låren ger stabilitet.

Viskoelastiskt skum av bästa kvalitet, CONFOR® foam, hög stabilitet, god luftgenomsläpplighet samt mycket bra tryckfördelning vid sittande.

## Överdrag

Dynan har som standard ett heltäckande överdrag av svart laminerad velour.

Sittytan är monterad med motsatt fiberriktning. Det förhindrar glidning framåt och samtidigt underlättar sidoförflyttning och förflyttning bakåt. Överdraget är försett med tvärgående kardborreband hona/hane på undersidan.

## Extra överdrag

För att beställa extra överdrag ange Ö framför artikelnummer (Ö95-3030-P).

## Inkontinensöverdrag

Inkontinens-/skyddsöverdrag finns som tillbehör. För att förenkla vid tvätt är skyddsöverdraget utformat som en hätta med resår. För att beställa en inkontinenshätta ange INKO framför artikelnumret T.ex. INKO95-3030-P.

## Alternativa överdrag

Förutom överdraget i luftig laminerad velour finns stretchöverdrag med inbyggt inkontinensskydd. Dessa överdrag är också försedda tvärgående kardborreband hona/hane på undersidan. För att beställa Bima formsits barn med detta överdrag ange Ö+art.nr-4 t.ex. Ö95-3030-P-4.

## Anpassningar

[Blanketten för anpassning](#) är en bra grund att utgå ifrån. Finns att ladda ner från vår hemsida Valfria mått kan kombineras med bendelare, abduktionskil, knästöd och sidostöd mm. Även ursågningar för benlängdsskillnader, olika vinklar och höjder kan erhållas. Vi har kompetent personal till att utföra sömnad av överdrag till avancerade anpassningar. Leveranstid för en anpassning med sömnad är max 15 arbetsdagar.

## Artikelnummer, mått och max brukarvikt

Bima formsits barn			Kupad undersida -K					Plan undersida -P		
(cm)	Sitsdjup	Sd/ Sd <sup>tot</sup>	Sd = Sitsdjup till ryggrör och Sd <sup>tot</sup> = Sitsdjup på mitten						Höjd (cm)	Max vikt (kg)
Bredd	20/23	25/28	27/30	30/33	33/36	35/38	40/43	CONFOR® Foam		
25	95-2520-K	95-2525-K	95-2527-K	95-2530-K				CF40	5,5	20
27		95-2725-K	95-2727-K	95-2730-K	95-2733-K	95-2735-K		CF40	5,5	25
30			95-3027-K	95-3030-K	95-3033-K	95-3035-K		CF42	5,5	30
33			95-3327-K	95-3330-K	95-3333-K	95-3335-K	95-3340-K	CF42	5,5	35
35				95-3530-K	95-3533-K	95-3535-K	95-3540-K	CF42	5,5	40
40					95-4033-K	95-4035-K	95-4040-K	CF42	5,5	45
25	95-2520-P	95-2525-P	95-2527-P	95-2530-P				CF40	5,5	20
27		95-2725-P	95-2727-P	95-2730-P	95-2733-P	95-2735-P		CF40	5,5	25
30			95-3027-P	95-3030-P	95-3033-P	95-3035-P		CF42	5,5	30
33			95-3327-P	95-3330-P	95-3333-P	95-3335-P	95-3340-P	CF42	5,5	35
35				95-3530-P	95-3533-P	95-3535-P	95-3540-P	CF42	5,5	40
40					95-4033-P	95-4035-P	95-4040-P	CF42	5,5	45

## Brukarvikt

Vi kan även anpassa materialen i dynan så att den klarar högre brukarvikt.

## Rekonditionering

Dynbasen rengörs genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning 40°C som förbehandlats med bakteriehämmande medel. Dynbasen kan också ångtvättas.

Överdraget tvättas i maskin 60°C med stängd dragkedja. Därefter centrifugering och torktumling.

### Fakta

Klassificering: Tryckavlastande  
ISO-kod 04 33 03

Brandnorm: Uppfyller ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745

Dynans vikt: Bima formsits barn 30x30x5,5cm  
kupad ca 0,4 kg

Material i dynbas: Polyeter, polyeten och  
CONFOR® foam

Material i överdrag: Svart laminerad velour,  
alternativt i inkontinens skyddad stretch, antiglid



Tillverkare

BIMA PLASTTEKNIK AB  
Trålvägen 5

432 74 TRÅSLÖVSLÄGE

Telefon 0340-41950

[info@bimasweden.se](mailto:info@bimasweden.se)

[www.bimasweden.se](http://www.bimasweden.se)